

MICROSALT

DAS GESUNDE EXTRA FÜR SAUNA & INFRAROT.



DIE NEUE DIMENSION DER TROCKENSALZINHALATION

Hoher gesundheitlicher Nutzen, einfache Bedienung und Wartung sowie handliches Format: Der SaltProX ist das erste Microsalt-Gerät speziell zum Nachrüsten in bestehende Sauna- oder Infrarotkabinen. Die positiven gesundheitlichen Wirkungen von Trockensalz sind durch viele wissenschaftliche Studien erwiesen. Mit der patentierten Microsalt-Technologie haben wir sie auf der Basis neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse für eine breite Nutzung erschlossen. Die Auszeichnung mit dem European Health and Spa Award 2014 würdigt diese Innovationsleistung als „Best Spa Product Innovation Technique“.

Mit dem neuen SaltProX haben wir es jetzt geschafft, diese einzigartige und patentierte Technologie ganz leicht zugänglich und selbst für kleine Betriebe erschwinglich zu machen.

Klein, leicht, handlich und formschön – das gesunde Extra für die Sauna oder Infrarotkabine integriert sich mit seinem modernen und zeitlosen Design harmonisch in jede Wärmekabine.

Und der Microsalt SaltProX ist dank Akkubetrieb absolut flexibel einsetzbar, so dass er sich auch ideal zum Vermieten an Gäste im Day Spa oder Hotel eignet.

DIE PERFEKTE KOMBINATION FÜR DIE GESUNDHEIT IHRER GÄSTE

Es gibt viele gute Gründe, Sauna- oder Infrarotkabinen anzubieten. Hier ist ein weiterer. Mit dem SaltProX lässt sich jede Sauna oder Infrarotkabine in einen Salzinhalationsraum verwandeln, denn wir haben ihn für den Einsatz in Wärmekabinen konzipiert.

Denn nur hier lässt sich problemlos die Luftfeuchtigkeit auf weniger als 40 Prozent rel. Feuchte bringen, damit so ein Mikroklima mit Trockensalznebel entsteht. Die Kabine fängt diesen Nebel ein. So entsteht mit diesem sehr kompakten Gerät eine hohe Salz-Aerosol-Konzentration. Das Ergebnis: Maximaler Nutzen für die Gesundheit mit minimalem Aufwand.




Ganz flexibel: Der Microsalt SaltProX wird einfach auf die Liege in der Wärmekabine gestellt oder mit der mitgelieferten Konsole an der Wand befestigt und Ihre Gäste können ihn ganz leicht wieder abnehmen.

EIN VERFAHREN, VIELE GESUNDHEITLICHE VORTEILE: DAS MICROSALT-KONZEPT

Eine steife Brise bläst ins Gesicht, Wasser umspült die Füße. Die Lippen schmecken salzig. Ein Aufenthalt am Meer tut einfach gut, nicht nur der Seele, sondern vor allen Dingen den Atemwegen. Gerade für Menschen mit Atemwegsbeschwerden gibt es daher die Microsalt-Anwendung. Der Microsalt SaltProX erzeugt mit seiner unsichtbaren Zerkleinerungstechnologie ein besonders feines Salzaerosol in höchster Qualität, das sich in der gesamten Kabine verteilt. Durch die Reibung zwischen den einzelnen Salzkristallen werden diese sehr fein zermahlen und zudem negativ aufgeladen (triboelektrischer Effekt). Die hierbei

herkömmlichen Salzanwendungen – über das gesamte Atemwegssystem, von der Nase, in die Nebenhöhlen, den Rachenraum bis in die äußersten Lungenbereiche, und können hier schleimlösend wirken. Die Anwendung von Microsalt bezweckt eine tiefgründige Reinigung der Luftwege bis in die feinsten Lungenbläschen sowie die Säuberung und Revitalisierung der Haut. Regelmäßige Inhalationen können zudem das Immunsystem unterstützen. Microsalt empfiehlt sich besonders bei Heuschnupfen, Asthma, Bronchitis, Mukoviszidose oder chronischen Lungenerkrankungen. Auch für Menschen, die häufig

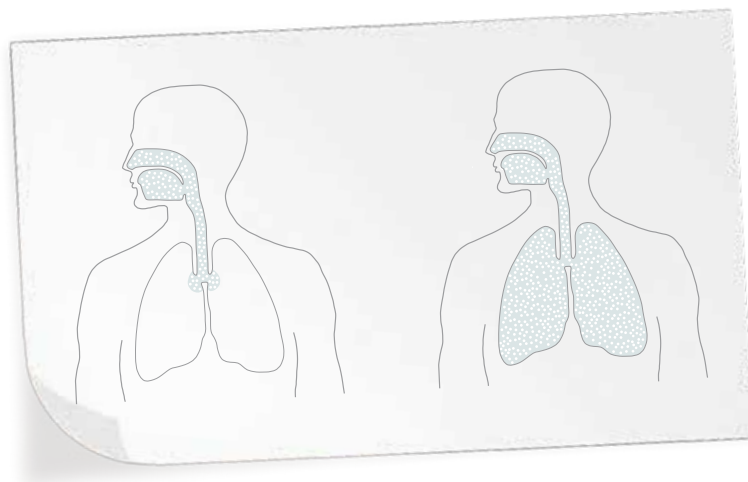

Eindringtiefe der mit Salz angereicherten Luft bei – links – herkömmlicher Technik und – rechts – Microsalt.

entstandene Ionisation der einzelnen Salzteilchen fördert die Verbreitung im Raum und nutzt außerdem der Reinigung der Luft, mit der die Atemwege und die Haut ständig in Berührung kommen. Beim Einatmen verteilen sich diese feinen Salzpartikel – anders als bei

unter Erkältungsbeschwerden leiden oder mit Stirnhöhlen- und Nebenhöhlenentzündungen zu kämpfen haben, sowie für Menschen mit Hauterkrankungen, Schlafstörungen oder Depressionen ist Microsalt gedacht.

SO WOHLTUEND WIE EIN AUFENTHALT AM MEER.

- Trockensalznebel verfügt über stark feuchtigkeitsbindende Eigenschaften und hilft dadurch, festsitzende Sekrete innerhalb der Atemwege leichter zu lösen.
- Trockensalznebel wirkt entzündungshemmend und desinfizierend.
- Trockensalznebel regt den Abtransport von Schleim und Schmutz aus den Atemwegen an.
- Das für die Microsalt-Anwendung verwendete natürliche Steinsalz hat mit über 99 Prozent Natriumchlorid den höchsten in der Natur vorkommenden Reinheitsgrad.





KOMFORTABEL UND KINDERLEICHT: SO FUNKTIONIERT DER SALTPROX

Noch nie war es einfacher und sicherer, der Gesundheit seiner Gäste etwas Gutes zu tun. Die leicht verständliche Funktionslogik des Microsalt SaltProX orientiert sich am tausendfach bewährten Schema anderer Produkte aus unserem Hause. Dadurch ist das Bedienen des Geräts komfortabel, kinderleicht und sicher. Einfach das Gerät in der auf 30-50° C vorgeheizten Wärmekabine platzieren, den Hauptschalter einschalten und den Salzbecher in das Gerät einschieben. Nach dem Einschalten der Start-/Stopp-Taste startet das Gerät mit der Salz-Aerosol-Produktion. Nach rund zehn

Minuten ist eine optimale Trockensalzkonzentration in der Sauna oder Infrarotkabine vorhanden und die Farbe der Beleuchtung wechselt von Orange zu Blau. Schon können Ihre Gäste mit der Inhalation starten. Nach einer Stunde schaltet das Gerät automatisch ab. Auch die Montage des SaltProX ist ein Kinderspiel: Das Gerät wird mit der mitgelieferten Wandhalterung an der Wand befestigt und lässt sich jederzeit wieder abnehmen. Nach rund 1,5 Stunden Ladezeit liefert der Akku genügend Leistung für drei bis fünf Anwendungen.

Wie durchdacht ein Produkt ist, sehen Sie beim Blick auf die Details. Speziell für den Microsalt SaltProX gibt es portionierte Salzsticks, welche die optimale Dosis trockenes, hochwertiges Salz für eine Anwendung enthalten. Die in den Sticks enthaltene Menge ist auf die maximal empfohlene Anwendungsdauer von einer Stunde ausgelegt. Um das Gerät startklar zu machen, entnimmt man

einfach den Becher aus dem Gerät und füllt den Inhalt eines Salzsticks zusammen mit der Zerkleinerungskugel aus Edelstahl ein. Danach nur noch den Becher aus bruchsicherem und spülmaschinenfestem Spezialglas wieder in das Gerät einsetzen – fertig. Das geht fast wie von selbst, weil die Halterung den Salzbecher automatisch in die richtige Position führt.



Ganz genau: Die Salzsticks enthalten die optimale Menge Salz für eine Anwendung.



Ganz einfach: Die Halterung führt den Salzbecher beim Einsetzen automatisch in die richtige Position.



DEUTSCHLAND | ERICH-KLAFS-STRASSE 1-3 | D-74523 SCHWÄBISCH HALL
TELEFON +49 (0)791 501-0 | FAX +49 (0)791 501-248 | INFO@KLAFS.COM | WWW.KLAFS.COM

ÖSTERREICH | SONNWIESENWEG 19 | A-6361 HOPFGARTEN/TIROL
TELEFON +43 (0)5335 23 30-0 | FAX +43 (0)5335 23 30-36 | INFO@KLAFS.AT | WWW.KLAFS.AT

SCHWEIZ | OBERNEUHOFSTRASSE 11 | CH-6342 BAAR
TELEFON +41 (0)41 7 60 22 42 | FAX +41 (0)41 7 60 25 35 | BAAR@KLAFS.CH | WWW.KLAFS.CH